


**Pour éviter ça !**

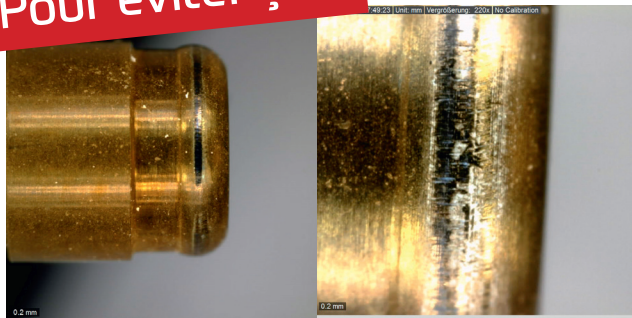

Usure prononcée après 10 000 cycles sur pilier «standard».

**Utilisez ça !**




Piliers Novaloc/Optiloc intacts après 3,35 millions de cycles.

# Novaloc™

Un pilier avec un nouvel état de surface en ADLC  
(amorphous diamond-like carbon) **pour éviter les usures prématurées !**

## Pilier compatible avec :


Camlog®  
Conelog®  
Astra Tech TX®  
Astra Tech EV  
Biomet 3i Certain®  
Nobel Biocare Active/CC®  
Nobel Biocare Bränemark®  
Nobel Biocare Replace Select®  
Straumann Bone Level®  
Straumann Synocta®  
Zimmer Tapered Screw-Vent®  
Dentsply-Friadent Anklyos®  
Dentsply-Friadent Frialit/Xive®  
MIS SEVEN®  
Bio Horizon  
Dentium SuperLine Implantium  
MegaGen AnyRidge®  
Neoss® ProActive®

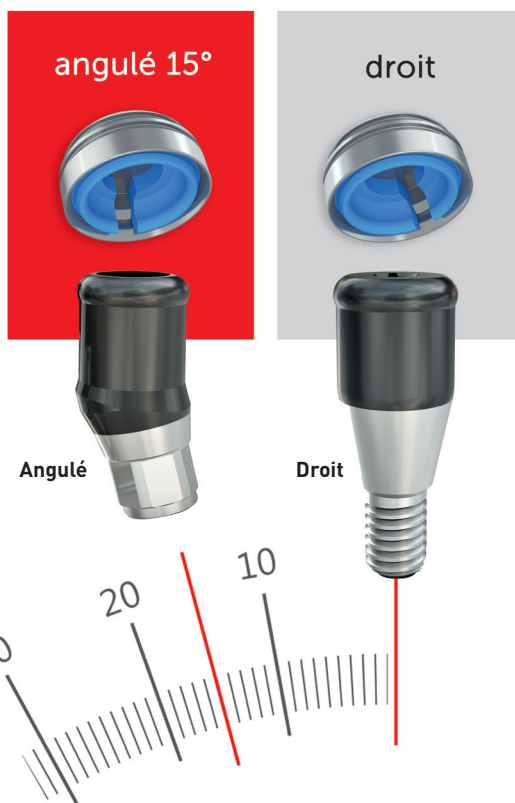

Durée de vie plus longue  
et meilleure hygiène



Manipulation  
particulièrement facile

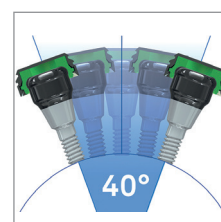

Plus de flexibilité

Matrices  
**Novaloc™**



Coffret de boîtier  
titane ou PEEK Novaloc®




CE 0481

Boîte d'équipement Novaloc®  
(sans consommables)  
Avec 3 instruments



## LA MISE EN ŒUVRE DES BOÎTIERS

# Novaloc™

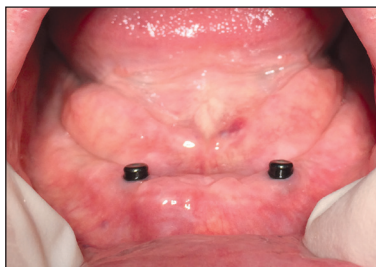


**1** Poser vos piliers (serrage du pilier en Ncm préconisé par le système implantaire). Préparer un espace dans l'intrados et faire porter l'appareil pendant 4/5 jours, sans les parties femelles.



**2** Prévoir l'emplacement nécessaire pour les futurs boîtiers dans l'intrados de la prothèse. Epaisseur de résine V/L 2/3 mm max. (Faire un petit évent côté lingual pour laisser fuser la résine).



**3** Positionner la bague blanche de protection sur les piliers avant de mettre les boîtiers.

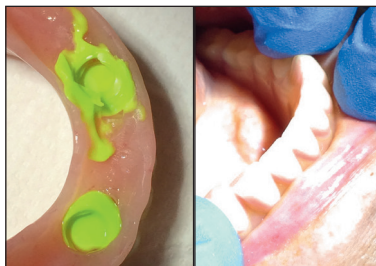

**4** Vérifier en bouche qu'il n'y ait plus aucun contact entre les boîtiers et l'intrados de la prothèse pour n'être qu'en appui muqueux.




**5** Mettre du Bonder Picopreci Plus sur les boîtiers et dans l'intrados à l'emplacement des futurs boîtiers et le photopolymériser.




**6** Mettre la résine photo Picopreci Plus dans l'intrados de la prothèse à l'emplacement des futurs boîtiers.



**7** Repositionner l'appareil en bouche ; mettre en occlusion non forcé (sans pression) et photopolymériser à travers l'appareil (extérieur et intérieur).

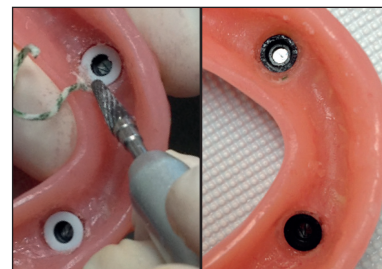

**8** Après confirmation de la photopolymérisation, retirer les bagues blanches et le surplus de résine afin de pouvoir enlever les unités de montages (noires ou blanches).

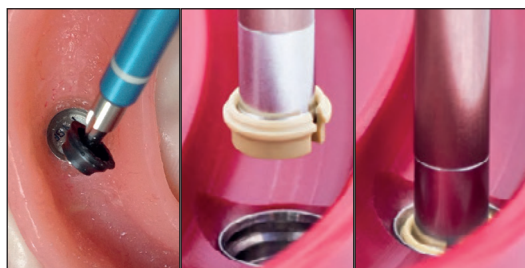

**9** Enlever les unités de montage et les remplacer par la rétention faible (blanche) avec l'instrument NOVALOC marron.



**10** Finitions et polissage de l'appareil.



**11** Essai en bouche des forces de rétentions.



### Pico-light LED

Lampe de polymérisation.  
Réf. 475.250

**\*Utilisation du Picopreci Plus :**  
polymériser avec une lampe ayant une longueur d'onde de 400 +/- 10 nm et une intensité lumineuse de 400-600 Lumen.



### Picopreci Plus\*

Résine photopolymérisable.  
Kit complet 3 seringues et bonder 5 ml.  
Rose. Réf. 475.100

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE, Classe II a et IIb. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou l'étiquetage remis. Non remboursé par les organismes d'assurance santé.

